

Spacemaker Ministöd

Bruksanvisning



Studera denna bruksanvisning noggrant innan ni börjar använda ministödet.

Om ni har några frågor rörande användningen eller underhållet av ert nya ministöd och inte hittar svaren i bruksanvisningen kontakta oss.

Endast personal som läst och förstått instruktionerna för användning och underhåll, som beskrivs på följande sidor, får använda ståndödet.

Spacemakers ministöd är utvecklat för effektiv ståträning och förflyttning både på institution och i hemmiljö.

Med ståndödet erhålles en nyttig belastning av skelettet, samtidigt som mag-/lungfunktion och blodcirkulation förbättras.

Högsta brukarvikt 75 kg.

Spacemaker Ministöd

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmän beskrivning	1
Innehållsförteckning	2
Användningsområde	3
Ministödets delar	3
Uppackning/Montering av ministödet	3
Inställning av ministödet	4
Inställning av konsol	4
Inställning av överdel	4
Inställning knästödet	4
Användning av ministödet	5
Placering av ministödet	5
Lyft av brukaren	5
Sänkning av brukaren	5
Säkerhetsinstruktioner	5
Underhåll	6
Teknisk specifikation	6
Garanti	7
CE - märkning	7

Spacemaker Ministöd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Spacemaker ministöd är avsedd, efter ordination av behörig personal, för ståträning samt kortare förflyttning på både institution och i hemmiljö. Uppresning/sänkning i ministödet bör aldrig göras av brukaren själv..


MINISTÖDETS DELAR

Ministödet består av

(2) Överdel med
bordskiva, magstöd och
armstöd

(3) Konsol för sele

Bromsbara hjul
för transport

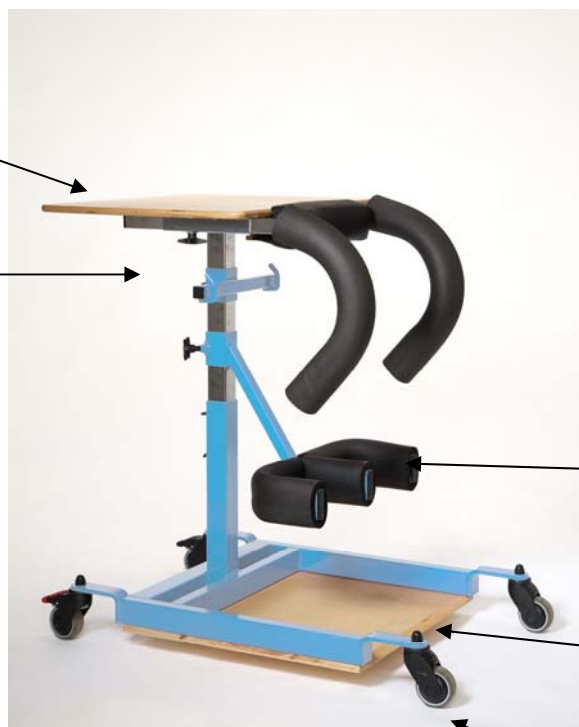

(4) Knästöd

(1) Stödplatta

Hjul för transport

UPPACKNING/MONTERING

1. Placera stödplattan (1) på golvet.

Spacemaker Ministöd

3. Kontrollera att den påmonterade konsolen (3) för selen är fastspänd ca 10 cm från bordsskivan.
4. Montera knästöd (4) på överdelspelare (2)
5. Ta överdel (2) med påmonterad konsol (3), knästöd (4) och placera i stödplattans pelare (1). Justera höjd och spänn fast med de två rattarna.
6. Trä på ett av cellgummiskydden på vardera armstöden respektive knästöden
7. Justera bordsskivan och spänn fast.
8. Häng på remmen med stjärtlapp på konsolen.

INSTÄLLNING AV STÅSTÖDET

INSTÄLLNING AV KONSOL

Lossa stjärnratten och placera konsolen på önskad höjd. Dra åt ratten ordentligt.

Kroka fast en sidan av selen på konsolen.

INSTÄLLNING AV ÖVERDEL

Justera överdelen så att brukaren har möjlighet att, vid behov, få stöd för sina armar.

Inställningen sker genom att lossa de två rattarna Efter inställning till önskad höjd spänns rattarna åter.

INSTÄLLNING AV KNÄSTÖD

Höjdinställningar av knästödet görs med stjärnratt

Spacemaker ministöd

ANVÄNDNING AV MINISTÖDET

PLACERING AV MINISTÖDET

Kör fram kombistödet framför brukaren och justera höjdinställningen. Använd skalan, på stolpen, för att notera de personliga inställningarna.

Justera knästödet vid behov.

Bromsa hjulen på stödet.

LYFT AV BRUKAREN

Hjälp brukaren med lämplig uppresningsteknik till stående ställning. Kroka fast lyftselen andra ögla på ståstödet. Spänn bandet.

Brukaren är nu redo för ståträning.

SÄNKNING AV BRUKAREN

Kontrollera selens placering. Placera rullstol/stol omedelbart bakom brukaren.

Släpp på bandet. Kroka loss en av sidorna och placera brukaren på stolen. Koppla loss selen helt

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Använd inte ståstödet innan denna bruksanvisning har lästs igenom.

Maximal brukarvikt för ståstödet är 75 kg.

Lämna inte brukaren i stående ställning obevakad.

Placera ståstödet på plant underlag.

Vid uppresning/sänkning skall hjulen vara bromsade och stödet korrekt inställt

Ståstödet får inte användas på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual.

Producentansvar för CE-märkningen bortfaller vid modifiering.

Spacemaker Ministöd

UNDERHÅLL

Det normala underhållet består i att man kontinuerligt okulärbesiktat minstödet med avseende på förslitningar. Var speciellt noggrann med kontrollen av bärsele.

Minstödet kan rengöras/avtorkas med normala rengöringsmedel även alkoholbaserade.

REKONDITIONERING

- 1) Torka av hela produkten med en fuktig trasa. Desinficera vid behov.
- 2) Kontrollera att hjulen är ordentligt fastsatta samt kontrollera bromsfunktionen.
- 3) Kontrollera att justeringarna för knästöd och remhållare fungerar samt att rattarna är hela.
- 4) Kontrollera att bordets justering fungerar.
- 5) Vid behov byt skydden för knästöd respektive armstöd.

TEKNISK SPECIFIKATION

Avsedd för personer längd	100 - 150 cm
Max brukarvikt	75 kg
Bredd	58 cm
Djup	81 cm
Höjd	Ståplatta/Bord 62,5 - 90,5 cm Golv/Topp 68,5 - 96,5 cm
Högsta höjd	96,5 cm
Lägsta höjd	62,5 cm
Stativ	Lackerade respektive förnicklade stålrör
Bottenplatta/ Bordsskiva	15 mm klarlackad björkplywood
Överdel	
Knästöd	Coated cellgummi
Sele	Textilväv

Materialåtervinning

Överdel samt bottenplatta, bordsskiva och gummiskydd	Brännbart avfall
Styrbox och ställdon	Elektronikavfall
Stativ, knästöd, mm	Metallavfall

Spacemaker Ministöd

GARANTI

Kebo garanterar att produkten är fri från tillverknings- och materialfel upp till två år från leveransdatum. Garantitiden på knästödens/armstödens gummiskydd är 6 månader. Denna garanti begränsar sig till utbyte av returnerade felaktiga delar.

Kebo tar inte ansvar för kostnader, obehag eller skador orsakade av felaktig användning av utrustningen. Visar produkten tecken på onormal slitage beroende på felaktig användning eller på felaktiga rutiner gäller inte denna garanti. Garantin gäller inte heller kosmetisk åverkan eller övrigt normalt slitage.

CE MÄRKNING



CE-märkt enligt MDD 93/42EEC produktklass 1

AlfaCare Danmark ApS, Sverige
Tingsvägen 19
191 61 Sollentuna

Tel: 08 564 85 030
Email: info@alfacare.se
www.alfacare.se

ALFACare